




Kiilto Erisan Des

Overfladedesinfektion

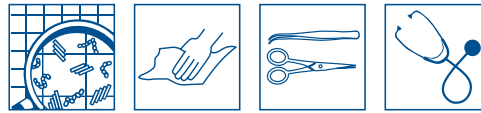

Erisan Des er målrettet sundhedssektorens særlige behov og egner sig til: desinfektion af almene overflader og områder kontamineret med kropsvæsker, rengøring og desinficering af undersøgelses- og sygeplejedyr, desinfektion af udstyr, instrumenter og overflader samt desinfektion af udstyr og instrumenter inden for tandpleje.

Anvendelsesområde

Rengøring og desinfektion af overflader indenfor sundhedssektoren samt som desinfektionsmiddel til brug i ultralydsrensere og til desinfektion af områder kontamineret med kropsvæsker.

Desinficerende rengøring af non-invasive instrumenter og redskaber (henstand). Kan også bruges til præ-desinfektion af invasive instrumenter, der efterfølgende vaskes og steriliseres.

Overfladedesinfektion af dentale units og apparater samt til vedligeholdelse af instrumenter (herunder rengøring med ultralyd) i henhold til hygiejnekrav.

Anvend 2-5% opløsning til henstand, overfladedesinfektion og i ultralydsrensere.

Erisan Des er testet på sart materialer som aluminium, gummi og forskellige former for plastik.

Medicinsk udstyr, til professionel brug.

Produktegenskaber

Effektivt, hurtigt virkende desinfektionsmiddel med gode rengøringssegenskaber, tåler høj organisk belastning. De aktive ingredienser er nøje udvalgt og omfatter didecyl dimethyl ammonium klorid (kvartær ammoniumforbindelse), (3-aminopropyl) dodecylamin (alkylamin) og phenoxyethanol. Synergien mellem disse ingredienser bevirker en bakterie-, vira- og svampedræbende effekt.

Effektiviteten af desinfektionsmidlet Erisan Des er grundigt testet (testopløsning i parentes):

EN 13727 (bakteriedræbende effekt) 5 min (1%)

EN 13624 (gærdræbende effekt) 5 min (1%)

EN 14476 (kappebærende virus) 2 min (1%)

EN14476 (murine norovirus) 60 min (5%)

EN 14561 (bakteriedræbende effekt/henstand) 30 min (1%)

EN 14562 (gærdræbende effekt/henstand) 30 min (1%)

EN 16615 (bakteriedræbende/gærdræbende effekt) 1 min (2%)

Også testet:

EN 13697 (bakteriedræbende effekt) 5 min (0,5%)

EN 13697 (gærdræbende effekt) 15 min (0,5% gær, 1% svampe)

Brugsanvisning

Bland en opløsning med rent, koldt vand. Til desinfektion af medicinsk udstyr og medicinske instrumenter skal der anvendes en beholder med låg til iblødsætning. Følg de angivne iblødsætningstider for at undgå materialeskader. Bland en frisk opløsning en eller to gange om ugen, alt efter væskens renhedstilstand.

I ubrugt tilstand kan væsken anvendes inden for en periode på fire uger.

	Opløsning	Erisan Des	Vand	Tid	Bemærk
Overfladedesinfektion	2%	10 ml	490 ml	1 min	Skyl hvis nødvendigt
Områder kontamineret med kropsvæsker	5%	25 ml	475 ml		Skyl
Instrument desinfektion	2%	20 ml	980 ml	30 min	Skyl
M. norovirus	5%	50 ml	950 ml	60 min	Skyl
Bor (dental)	ufortyndet			30 min	Skyl
	5%	50 ml	950 ml	30 min	Skyl
Ultralydsrenser	2%	20 ml	980 ml	30 min	Skyl

Bemærkning

Det anbefales at skylle de behandlede overflader dagligt/ugentligt med vand eller bruge et mildt, non-ionisk rengøringsmiddel.

I tilfælde af epidemier med C. diff anbefales brug af desinficeringsmidlet Erisan Oxy+.

Indhold

Ingrediens		Effekt
Didecyldimethylammonium chlorid	5-15%	Biocid
2-phenoxyethanol	5-15 %	Biocid
Isopropanol	<5%	Biocid
Nonioniske overfladeaktive stoffer	< 5%	Rengørende egenskaber
Triethanolamin	< 5%	
N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropan-1,3-diamin	<5%	
Diethanolamin	<1%	

pH produkt

11.0

pH brugsopløsning

10.0

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur. Tåler ikke frost.
Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.

Produktionsland

FINLAND

Anvendelses- og miljø sikkerhed

Alvorlige hændelser relateret til brugen af Erisan Des skal indberettes til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale tilsynsførendes myndighed (Lægemiddelstyrelsen).

Læs brugsanvisning før brug.
Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.

Emballagematerialer

Emballagen er fremstillet af HDPE plast som er et genanvendeligt materiale.

Forpackningsstørrelse / Varenummer

Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
3 x 3 l	8127	6417964081275	6417964482416
12 x 500 ml	8126	6417964081268	6417964482423

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.