




Innova 100

Maskinvaskemiddel til sundhedssektoren

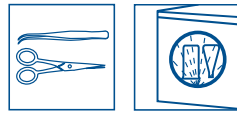

Flydende maskinvaskemiddel til instrumentvaskemaskiner. Specielt udviklet til sterilcentraler og krævende genbehandlingssopgaver.

Anvendelsesområde

Instrumenter og udstyr i sundhedssektoren, der er fremstillet af rustfrit stål, forskellige plastmaterialer, silikone og gummi. Kan også anvendes på aluminium og anodiseret aluminium pga. produktets anti-korrosive egenskaber. Også velegnet til maskinvask af dentale instrumenter.

Medicinsk udstyr, til professionel brug.

Produktegenskaber

Effektivt ikke-skummende maskinvaskemiddel med høj materialekompatibilitet. Specielt udviklet til krævende opgaver, der involverer instrumenter og udstyr fremstillet af forskellige materialer.

Brugsanvisning

Beholderen tilsluttes vaskemaskinens automatiske doseringssystem.

Anbefalet dosering: 0,2-0,5%. Den optimale dosering afhænger af det materiale, der skal vaskes samt mængden og kvaliteten af vandet.

Når maskinen fyldes, er det vigtigt, at instrumenter og udstyr placeres, så alle overflader spules med vand. Placér slanger og andet udstyr, der er vanskeligt at rengøre, i separate holdere.

Anbefalet vasketemperatur: 55°C. Temperaturen ved brug bør være mellem 40-80°C.

Følg instruktionerne fra producenten af instrumenterne/udstyret.

Bemærkning

Maskinen desinficerer termisk det rengjorte og skyllede udstyr samt maskinens indvendige dele i henhold til det valgte program. For at sikre et korrekt resultat, bør maskinens drift kontrolleres regelmæssigt.

Indhold

Ingrediens		Effekt
Kaliummetasilicat	< 5 %	pH regulerende, fjerner snavs, forhindrer korrosion
Kompleksbindere	5 - 15 %	Reducerer vandets hårdhed så produktet bliver mere effektivt
Polycarboxylat	< 5 %	Rengørende effekt, opløser snavs og binder det til vandet
Phosphonater	< 5 %	Blødgør vandet, opløser snavs og forbedrer skylning
Kaliumhydroxid	< 5 %	pH regulerende, alkalisk, fjerner snavs
Amfoteriske overfladeaktive stoffer	< 5 %	Vaskeaktivt stof

pH produkt	12.5
pH brugsopløsning	11.0
Opbevaring	Opbevares ved 5-35°C. Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato.
Produktionsland	FINLAND
Anvendelses- og miljø sikkerhed	Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen). Læs brugsanvisningen før brug. Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.
Emballagematerialer	Emballagen er fremstillet af HDPE plast, som er et genanvendeligt materiale.

Forpakningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
	3x5l Eur	8235	6417964082357	6417964486162
	3 x 5 l	8229	6417964082296	6417964485202



Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.