




Hydragel

Forbehandling

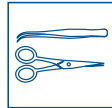

Forbehandlingsprodukt til kontaminerede instrumenter, der ikke rengøres umiddelbart efter brug.

Anvendelsesområde	Sprayes på de kontaminerede instrumenter for at forhindre, at smuds og snavs tørrer ind samt hæmmer vækst af mikroorganismer. Medicinsk udstyr til professionel brug.	
Produktegenskaber	Den gel-lignende spray danner en mikrobebestandig film på instrumenternes overflade. Effekten holder i 5 dage. Hydragel er vandopløselig og nem at skylle af. Velegnet til alle almindeligt anvendte materialer, dog ikke kobber og messing.	
Brugsanvisning	Sprayes direkte på instrumenterne, når de ligger i transportkassen. Det er vigtigt, at instrumenterne er helt dækket af den påførte gel. Følg sikkerhedsinstruktionerne for opbevaring og transport af instrumenter. Vask herefter instrumenterne som normalt.	
Bemærkning	Undgå kontakt med kemikalier, da det kan føre til korrosion eller ødelægge metaller. Kemikalierne kan forblive aktive under den beskyttende film. Ved stænk på gulvet er det vigtigt at rengøre med vand, da gulvet kan blive meget glat.	
Indhold	Ingrediens	Effekt
	Alkanolaminsalte af fedtsyrer	5 - 15% Rengørende effekt
	Nonioniske overfladeaktive stoffer	< 5% Vaskeaktivt stof, opløser snavs
	2-phenoxyethanol	Konserveringsmiddel
	Korrosionshæmmer	Forhindrer korrosion og dannelsen af mørke pletter
	Antiskummiddel	Reducerer produktets skummende egenskaber
pH produkt	9.0	
Opbevaring	Opbevares ved 5-25°C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.	
Produktionsland	FINLAND	

**Anvendelses- og
miljøsikkerhed**

Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen).

Læs brugsanvisning før brug.
Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.

Emballagematerialer

Emballagen er fremstillet af HDPE plast, som er et genanvendeligt materiale.

**Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer****Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)**

6 x 750 ml

8222

6417964082227

6417964482959

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.